


Manuel d'Implantation SNC Slide K7

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

Vue de Face

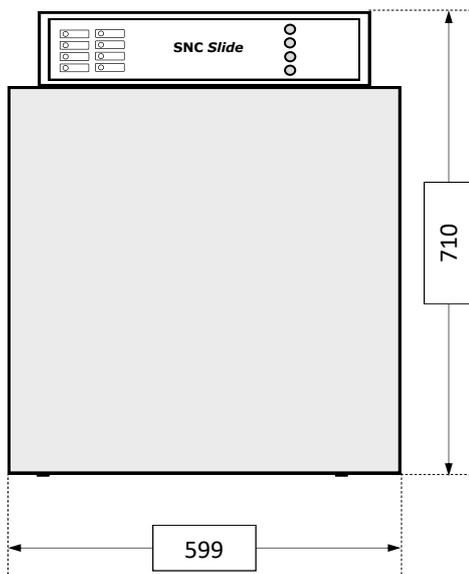

FICHE d'INSTALLATION :

Prévoir un espace supplémentaire de 5 cm à l'arrière de l'appareil entre la carrosserie et le mur pour permettre le passage du fil électrique.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230 Volts + Terre sur prise 16 A. (Puissance = 2130 Watts)

L'appareil doit être raccorder à une ligne directe sur le tableau électrique (disjoncteur 30 mA).

ALIMENTATION EN EAU : Eau froide du réseau d'eau potable. Installer un robinet standard type machine à laver (20x27).

VIDANGE : Tuyau type machine à laver Ø 40 avec siphon.

IMPORTANT: le tuyau souple de vidange sortant de l'appareil ne doit pas toucher l'eau du siphon (le raccourcir si nécessaire) et doit rester libre à l'entrée du tube de vidange sans étanchéité.

Volume d'eau consommée par bain en cycle automatique Panier = **9 litres**

Volume d'eau consommée par bain en cycle automatique Casette = **20 litres**

INSTALLATION :

Installer dans un meuble au sol de 60 cm de large au minimum.

L'appareil doit être installé dans une zone bien ventilée.

Ne jamais couvrir le capot pour éviter toute dégradation par manque de ventilation.

Il est conseillé de placer l'appareil à proximité d'un évier équipé d'un mitigeur douche afin de pouvoir nettoyer la cuve après chaque cycle.

RACCORDEMENTS (ouvrir le tiroir) :

1. Brancher la prise électrique. Mettre l'appareil sous tension par l'interrupteur I/O.

Lancer le cycle « Ouverture/Fermeture » du tiroir.

2. Brancher le tuyau flexible de raccordement à l'électrovanne d'arrivée en eau.

3. Raccorder le tuyau flexible de vidange à l'évacuation suivant les consignes d'installation.

4. Placer les bidons des produits de traitement sur le côté droit de l'appareil et plonger les cannes d'aspiration en respectant les codes couleurs appropriés à chaque produit :

Transparent pour **DETERBAKT®** - **Bleu** pour **DPH21**

5. Ouvrir le robinet d'eau et vérifier l'étanchéité des raccordements.

MISE EN SERVICE :

Mise sous tension par l'interrupteur I/O - le voyant vert « mise sous tension » et le voyant orange « Fin de cycle » s'allument.

Fonctionnement en cycle automatique : (boutons poussoirs "CYCLE AUTOMATIQUE PANIER" ou "CYCLE AUTOMATIQUE "CASSETTE")

▶ Vidange

▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons

▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit DETERBAKT® (T=15 min)

▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons

▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le produit DPH21

▶ Séchage par air chaud = 21 min (cycle PANIER) / 32 min (cycle "CASSETTE")

(Durée totale du cycle automatique "PANIER" ≈ 55 min)

(Durée totale du cycle automatique "CASSETTE" ≈ 75 min)

NB: Le voyant "FIN DE CYCLE" allumé signale la disponibilité de l'appareil.

EN FIN DE MISE EN SERVICE, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRIÉTÉ

(cuve rincée et essuyée - capot propre)

PRECONISATIONS D'UTILISATION : SNC Slide K7

RECOMMANDATIONS :

Ce laveur est réservé à un usage strictement professionnel (professionnel de santé uniquement).

L'installation d'un SNC Slide K7 doit être réalisée par un distributeur agréé GAMASONIC (par la société réalisant la facturation).

La mise en service et les tests doivent être réalisés par un distributeur agréé GAMASONIC et conformément au Procès-Verbal d'installation et la fiche « Installation et mise en service » de l'appareil.

Les instruments à nettoyer ne doivent pas dépasser du panier ; les instruments doivent être immergés complètement.

Une cuve à ultrasons ne doit jamais fonctionner sans eau.

Ne pas utiliser l'appareil en cas de coupures électriques répétées.

L'appareil doit être raccordé électriquement au compteur électrique via une ligne électrique dédiée (*Différentiel : 30 mA*).

Si un défaut apparaît lors du déroulement d'un cycle (voyant orange "DEFAUT NIVEAU" allumé clignotant), éteindre l'appareil et relancer le cycle préalablement lancé.

Ne pas utiliser l'appareil si la qualité de l'eau est non potable (= eau du réseau potable uniquement).

La garantie fabricant de l'appareil SNC Slide K7 n'est effective que dans le cadre du respect de l'installation précédemment décrite et de l'utilisation exclusive de DETERBAKT® et DPH21 validés pour ce laveur.

Ne jamais recouvrir le capot de l'appareil.

IMPORTANT: Ne jamais interrompre un cycle en cours, surtout au moment du séchage.

LEVAGE ET MANUTENTION : L'appareil doit être manipulé par 2 personnes pour effectuer son installation ou son démontage.

(Le levage s'effectue impérativement par la plaque réalisant la liaison avec le sol)

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN :

La cuve en inox doit être propre avant chaque utilisation.

Après chaque utilisation, il est recommandé d'effectuer le nettoyage de la cuve de l'appareil (et des pièces périphériques) avec le produit utilisé lors de la phase de nettoyage par l'appareil de manière à éviter tout risque de contamination chimique et tout risque d'incompatibilité avec l'utilisation d'autres produits.

Dans le cas de salissures d'une des cannes d'aspiration, procéder au remplacement de cette dernière.

Vérifier une fois par mois le fonctionnement des pompes doseuses et l'exactitude du dosage des produits avec un bécher gradué.

1 - OUVERTURE / FERMETURE DU TIROIR

- Ne pas empêcher l'ouverture ni la fermeture du tiroir de l'appareil lors du lancement d'un cycle « Ouverture/Fermeture ».

- Ne pas laisser d'objet (ou autres) pouvant empêcher la réalisation normale d'un cycle « Ouverture/Fermeture ».

- Tout dommage causé par une mauvaise utilisation du cycle « Ouverture/Fermeture » est à la charge de l'utilisateur.

- **En cas de nécessité, il est possible de stopper l'ouverture ou la fermeture du tiroir (2 possibilités) :**

▶ Appuyer sur l'interrupteur d'Ouverture/Fermeture stoppera le tiroir.

Une nouvelle impulsion (appui long d'au moins de 2 secondes) ré-ouvrira le tiroir.

▶ Couper l'appareil à l'interrupteur I/O. Remettre l'appareil sous tension puis appuyer 1 fois sur l'interrupteur « Ouverture /Fermeture » pour que le voyant fin de cycle s'allume. Une nouvelle impulsion (appui long d'au moins de 2 secondes) ré-ouvrira le tiroir.

2 - CYCLE PRÉDÉSINFECTION :

■ Mettre l'appareil sous tension par l'interrupteur I/O et ouvrir le tiroir (interrupteur "Ouverture/Fermeture").

[voyants: vert allumé– orange "FIN DE CYCLE" allumé].

■ Disposer dans la cuve de l'appareil : - le(s) panier(s) en inox **P3** ou **P12** et appuyer sur "PRÉDÉSINFECTION PANIER" - le(s) panier(s) porte-cassette(s) **PC17** et appuyer sur "PRÉDÉSINFECTION CASSETTE".

▶ La cuve se remplit d'eau avec le produit DETERBAKT® dosé à sa concentration normale d'emploi

▶ En fin de soins, immerger aussitôt l'instrumentation souillée dans le(s) panier(s)

▶ Le temps de prédésinfection débute une fois le dernier instrument immergé (se référer à la fiche technique du produit pour la durée de prédésinfection à respecter)

▶ Ouvrir et Fermer le tiroir (interrupteur "Ouverture/Fermeture") autant de fois que cela est nécessaire afin d'ajouter de l'instrumentation.

■ Lancer ensuite le cycle de nettoyage automatique souhaité en appuyant sur le bouton "CYCLE AUTOMATIQUE PANIER" ou "CYCLE AUTOMATIQUE CASSETTE". [voyants: vert allumé - orange "FIN DE CYCLE" s'éteint]

3 - CYCLE AUTOMATIQUE :

■ Mettre l'appareil sous tension par l'interrupteur I/O et ouvrir le tiroir (interrupteur "Ouverture/Fermeture") [voyants: vert allumé – orange "FIN DE CYCLE" allumé].

■ Disposer dans la cuve de l'appareil le(s) panier(s), en inox **P3** ou **P12** pour un cycle "PANIER" ou, porte-cassette(s) **PC17** pour un cycle "CASSETTE", rempli(s) avec l'instrumentation préalablement prédésinfectée.

■ Fermer le tiroir de l'appareil (interrupteur "Ouverture/Fermeture").

■ Lancer le cycle en appuyant sur le bouton "CYCLE AUTOMATIQUE PANIER", "CYCLE AUTOMATIQUE CASSETTE" :

▶ Le descriptif exact du cycle est à retrouver sur la fiche « Installation et mise en service »

▶ En fin de cycle ("PANIER" : 55min environ ou "CASSETTE" : 75min environ), le voyant orange "FIN DE CYCLE" s'allume.

▶ L'appareil est disponible pour une autre utilisation.

▶ **La phase d'asepsie ne se substitue pas à la phase de stérilisation.**

■ Ouvrir le tiroir et récupérer le(s) panier(s) en inox afin que l'instrumentation puisse passer à l'étape de stérilisation.

■ Fermer le tiroir et mettre l'appareil hors tension par l'interrupteur I/O, après usage.

Remarque :

En mode automatique, la pompe de vidange fonctionne par intermittence pendant le séchage pour évacuer les résidus de condensat. Il est normal de constater en fin de séchage, un reste d'eau en fond de cuve.

VOYANTS :

■ Les voyants oranges contrôlent les diverses fonctions pendant le cycle. Leur temps d'allumage correspond au temps de la fonction en cours. Les voyants "NIVEAU DETERBAKT®" ou "NIVEAU DPH21" allumés signalent le manque de produit dans les bidons. Dès l'allumage d'un de ces voyants, il faut procéder au renouvellement du bidon correspondant au voyant allumé.

▶ Tuyau TRANSPARENT = DETERBAKT®

▶ Tuyau BLEU = DPH21

Même sans produit, l'appareil SNC Slide K7 effectue son cycle complet, mais le nettoyage des instruments devient caduque.

N.B. : Malgré les voyants, il est prudent de vérifier régulièrement la présence du produit dans les bidons.

■ Voyant orange : "NIVEAU DEFAUT" allumé clignotant = Problème de niveau d'eau dans la cuve. Mise en sécurité par arrêt de l'appareil.

▶ Faire contrôler l'appareil par un technicien agréé.