

**l'EXCELLENCE du nettoyage  
par ULTRASONS**




**YSONIC**  
GAMASONIC - France

**SNC 9 - T**

**Laveur Automatique par Ultrasons « Plug and Play »**

**Performance - Efficacité - Sécurité**

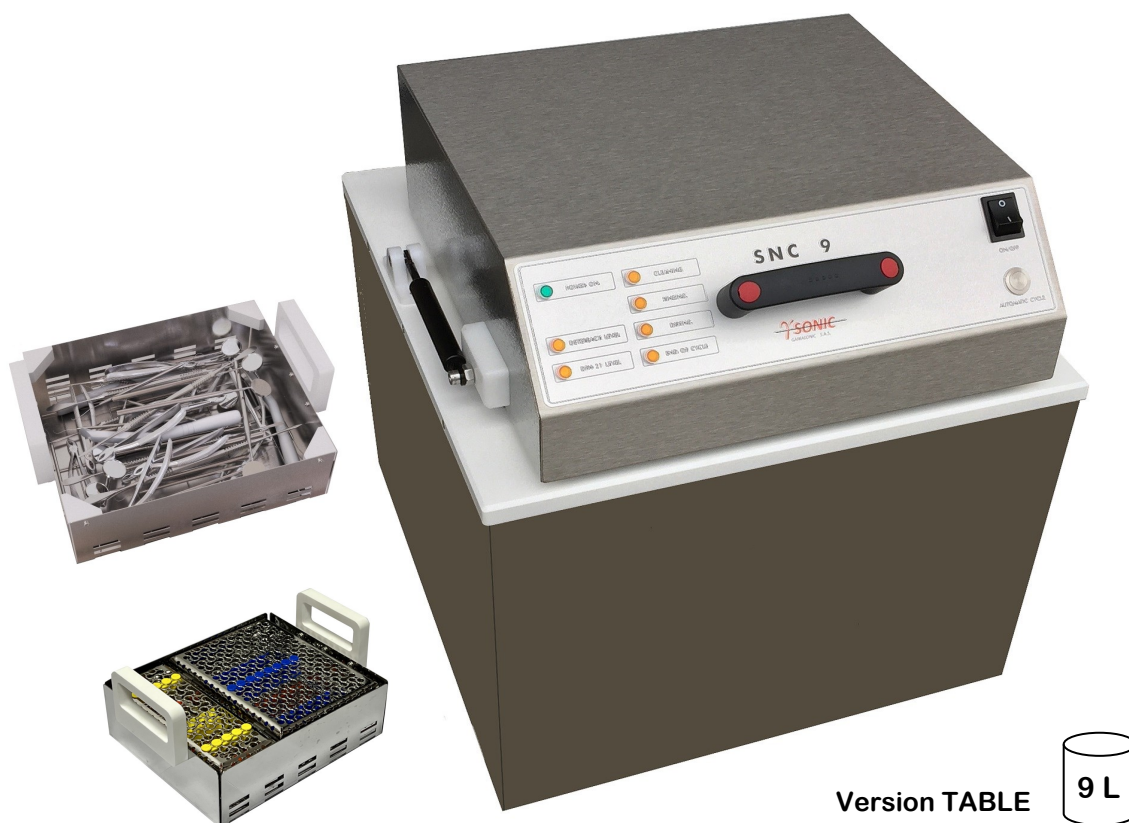

Version TABLE



**Le Laveur automatique SNC9-T bénéficie de  
la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour  
**Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher**  
l'instrumentation au cabinet dentaire (Vrac et Cassettes)**

# Laveur Automatique par Ultrasons

La version **SNC 9-T** “Plug and Play” permet de répondre aux besoins des cabinets de petites tailles et/ou n’ayant que peu de place dans la salle de stérilisation.



## **SNC 9 - T (Version Table)**

Traitement de l’instrumentation “classique” d’omni-pratiques et des cassettes de chirurgie

## **FONCTIONNEMENT**

**AUTOMATIQUE** : *Durée totale du cycle ≈ 45 min*

**Chronologie du cycle** :

- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Nettoyage sous Ultrasons avec le produit DETERBAKT®
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous Ultrasons avec le produit DPH 21
- ▶ Séchage par air chaud

## **INSTALLATION DE L'APPAREIL : (voir document technique)**

L'appareil SNC 9-T s'installe sur un plan de travail (propre et sec).

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 220V avec terre, une vidange type « machine à laver », une arrivée d'eau du réseau raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés à côté de l'appareil ou sous le plan de travail.

**L'appareil ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.**

**EN FIN DE MISE EN SERVICE,  
LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ  
(cuve rincée et essuyée)**



## **Panier P9**

- Instrumentation “Classique” : 10 à 15 patients

*OU*

- Cassettes : 6 cassettes 1/4 DIN ou 2 cassettes 1/2 DIN + 2 cassettes 1/4 DIN