

# FICHE TECHNIQUE

# DYNASEPT®

## PRODUIT PRET A L'EMPLOI POUR LE NETTOYAGE PAR ULTRASONS DES INSTRUMENTS DYNAMIQUES ET DES INSTRUMENTS (FRAISE, PINCE) DESTINÉS AUX ACTES MEDICO-CHIRURGICAUX

### DOMAINE D'APPLICATION

DYNASEPT® est produit prêt à l'emploi à base d'ammonium quaternaire et de chloramine T destinée au nettoyage par ultrasons des instruments dynamiques rotatifs et des instruments (fraise, pince).

Cette préparation nettoyante circule dans l'ensemble des éléments suivants :

- Instruments dynamiques rotatifs pour soins dentaires et de chirurgie maxillo-faciale.
- Instruments dynamiques rotatifs pour cabinet vétérinaire.
- Nettoyage des instruments dynamiques rotatifs en bloc opératoire.
- Toutes instrumentations médico-chirurgicales réutilisables nécessitant un nettoyage avant désinfection et/ou stérilisation.

DYNASEPT® est spécialement conçu pour être utilisé en association avec les ultrasons.

### CARACTÉRISTIQUES

#### Efficacité antimicrobienne

DYNASEPT® présente une activité :

- Bactéricide selon les méthodes normalisées EN 1040 à la concentration de 100% sur *Pseudomonas aeruginosa* et *Staphylococcus aureus*.
- Levuricide selon la méthode normalisée EN 1275 à la concentration de 100% sur *Candida albicans*.
- Virucide à la concentration de 100% sur l'*Adenovirus* (temps de contact 30 minutes).

### COMPOSANTS

Alcool isopropylique, Propylène glycol, E.D.T.A. tétrasodique, Chlorure de benzalkonium, Chloramine T, Eau.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- Excellente miscibilité à l'eau.
- Biodégradabilité supérieure à 90 %.
- pH : 10,5 ± 1,0.

### MODE D'EMPLOI

#### I - Pour instrumentation dynamique :

1. Mettre l'instrument tête en bas dans l'éprouvette.
2. Verser DYNASEPT® pur de manière à immerger totalement l'instrument.
3. Déposer l'ensemble dans le bain à ultrasons en prenant soin de bien immerger la base de l'éprouvette dans l'eau de la cuve.
4. Soumettre le tout aux ultrasons pendant 8 minutes minimum (Bain à usage unique).
5. Retirer l'instrument de l'éprouvette.
6. Egoutter l'instrument.
7. Rincer les instruments à l'eau potable (dureté <30° f).  
Temps de rinçage : ≥ 2min en cuve ultrasons et ≥ 1 min avec douchette.
8. Sécher les instruments de préférence à l'air comprimé de qualité médicale ou les mettre en rotation, sans spray, sur l'équipement pendant quelques secondes.
9. Poursuivre le protocole habituel pour obtenir la stérilisation des instruments.  
L'utilisation de DYNASEPT® ne permet pas d'atteindre la stérilité

#### II - Autre instrument (fraise, pince)

1. Immerger l'instrument (en bécetier ou en panier) dans un bain de DYNASEPT® pur.
2. Pour les étapes suivantes, se reporter au mode d'emploi du I, à partir du point 4.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- DYNASEPT® est un dispositif médical nettoyant à usage professionnel (professionnel de santé).
- Travailler dans un local adapté et ventilé. Le port de gants et de lunettes de protection est indiqué.
- Ne pas mélanger DYNASEPT® à d'autres produits.
- Renouveler le bain après chaque utilisation selon les précautions d'hygiène hospitalière (bain à usage unique).
- Les bacs et éprouvettes doivent être nettoyées et séchées à chaque changement de bain.
- En cas de projection de produit dans les yeux et sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau.
- DYNASEPT® n'est pas destiné à l'instrumentation thermosensible (non stérilisable).
- Ne pas utiliser DYNASEPT® si l'emballage est endommagé.

## CONSEIL DE STOCKAGE ET D'ÉLIMINATION

- Stocker DYNASEPT à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 4 °C et 40 °C.
- Évacuer DYNASEPT à l'égout à sa dose normale d'emploi.
- Evacuer les articles de conditionnement après les avoir rincés dans la filière d'élimination adaptée.

## PRÉCAUTION D'EMPLOI SUR PRODUIT PUR

- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges
- P264 Se laver soigneusement après manipulation
- P280 Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
- P305+P351+P338 En cas de contact avec les yeux : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes / Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste : Consulter un médecin.
- P261 Eviter de respirer les vapeurs
- P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé
- P304+P340 En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312 Appeler un centre antipoison en cas de malaise
- P403 Stocker dans un endroit bien ventilé
- P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche
- P405 Garder sous clef
- P501 Éliminer le contenu / récipient selon les réglementations nationales



## PRÉSENTATION COMMERCIALE

Flacons de 5 litres et de 1 litre.

## ESSAIS DE LABORATOIRE

- Détermination de l'activité bactéricide selon la norme EN 1040 - Antiseptique et désinfectant utilisé à l'état liquide - miscible à l'eau. Laboratoire ACM PHARMA accrédité COFRAC.
- Détermination de l'activité levuricide selon la norme EN 1275 - Antiseptique et désinfectant utilisé à l'état liquide - miscible à l'eau - Laboratoire ACM PHARMA accrédité COFRAC.
- Détermination de l'activité virucide sur Adenovirus selon NF T72180 - Laboratoire MICRAAM accrédité COFRAC.
- Essai de corrosion de DYNASEPT®. GAMASONIC.
- Etude de stabilité physico-chimique du produit fini. Laboratoire D2M Santé.

Date de 1<sup>ère</sup> mise sur le marché : 10/2002



**GAMASONIC** - ZAC DE L'ANGAUD - BP 52 - 63160 BILLOM - FRANCE

**Tél. 04 73 68 90 26** - Fax 04 73 68 97 43

FABRICANT