

# SNC Digital

*La chaîne d'asepsie automatisée*

## LAVEUR- DÉSINFECTEUR

DESTINÉ AU NETTOYAGE DES INSTRUMENTS MÉDICO - CHIRURGICAUX



Laveur-Désinfecteur  
EN ISO 15883-15  
(Dispositif Médical Classe IIb)




**SNC 17ED**  
Contenance :  
1 panier P12  
ou 2 paniers P3

**GAMASONIC**

# PUPITRE DE COMMANDE

VOYANTS de SIGNALISATION des FONCTIONS (Manuelles ou Automatiques)

TOUCHES de COMMANDE

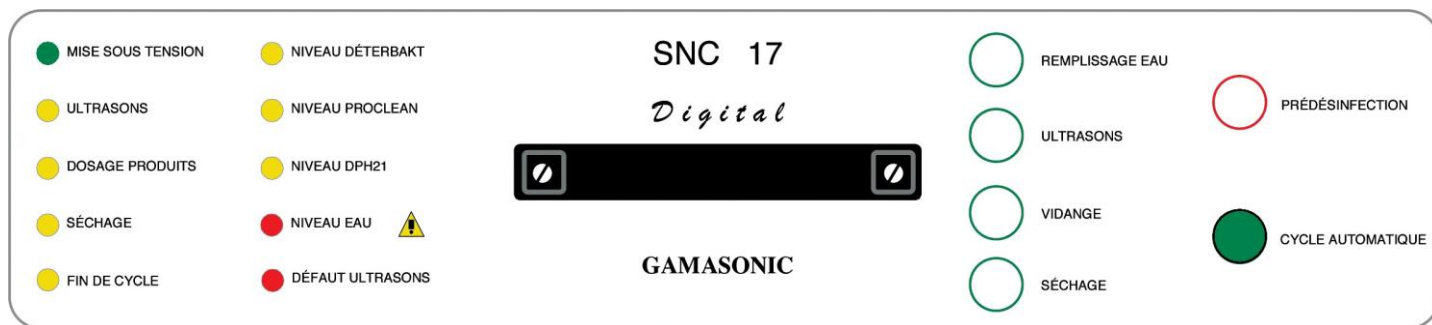

## SNC 17-ED

Contenance : 1 panier P12  
ou 2 paniers P3



## SNC 17-EDK7

Contenance : 1 panier porte-cassette PC17  
ou 1 panier P12 ou 2 paniers P3



## SNC 30-EDK7

Contenance : 2 paniers P12  
ou 2 paniers porte-cassette PC17  
(ou mixage : 1 x PC17 + 2 x P12)

## FONCTIONNEMENT

### CYCLES PRÉ-DÉSINFECTION *Paniers/Cassettes (sur version "K7")*

- ▶ Remplissage en eau avec dosage du produit DETERBAKT®

### CYCLES AUTOMATIQUES *Paniers/Cassettes (sur version "K7")*

- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
  - ▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit PROCLEAN
  - ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
  - ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le produit DPH21
  - ▶ Séchage par air chaud avec média-filtrant
- (Durée Cycle PANIER : 55 min / Durée Cycle CASSETTE "K7" = 75 min)

### CYCLES MANUELS 4 Fonctions distinctes pré-programmées

- ▶ Remplissage en eau claire
- ▶ Mise en service temporisée des ultrasons
- ▶ Vidange temporisée de la cuve
- ▶ Mise en service temporisée du séchage

N.B. Ces fonctions manuelles permettent de retrouver toutes les étapes de la chaîne d'asepsie manuelle.

### INSTALLATION DE L'APPAREIL : *(voir documents techniques)*

Son fonctionnement nécessite une alimentation électrique de 230V avec terre, une vidange type « machine à laver » et une arrivée d'eau du réseau (eau potable) raccordée sur un robinet type machine à laver (20/27).

Les bidons de produits sont raccordés et entreposés sous l'appareil.

Le niveau de produit des bidons est visualisé sur le tableau de commande.

Poids de l'appareil	SNC17-ED	: 27 kg
	SNC17-EDK7	: 30 kg
	SNC30-ED	: 36 kg
	SNC30-EDK7	: 39 kg

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

- L'appareil SNC DIGITAL est un dispositif médical pour le nettoyage et la désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (professionnel de santé).
- L'appareil SNC DIGITAL ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.
- Le dispositif ne doit pas être utilisé dans des zones accessibles aux patients.
- **Les performances de l'appareil SNC DIGITAL (EN ISO 15883-1-5) sont atteintes exclusivement avec l'utilisation des produits détergents DETERBAKT®, PROCLEAN et DPH21 validés par GAMASONIC.**
- Lire la documentation technique rattachée à l'appareil avant toute utilisation.

**EN FIN DE MISE EN SERVICE, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ**  
(cuve rincée et essuyée - capot propre)



Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle.

**GAMASONIC** - BP 52 - Z.A.C. de l'Angaud - 63160 BILLOM - France - Tél. 04 73 68 90 26 - Fax 04 73 68 97 43

- Fabricant Français -