

# SNC 17-EDK7 - INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

## FICHE d'INSTALLATION

### DÉCOUPE D'ENCASTREMENT :

L= 507mm x P= 407mm

Prévoir un espace supplémentaire de 10 cm à l'arrière de l'appareil entre le support en PEHD et le mur, pour permettre l'ouverture du capot.

**ALIMENTATION ÉLECTRIQUE:** 230 Volts + Terre sur prise 16 A, protégée par différentiel 30mA.

Installer une prise électrique accessible dans le meuble (voir plan).

Disjoncteur : 15 A. (à l'arrière du capot)

**ALIMENTATION EN EAU:** Eau froide du réseau d'eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH).

Installer un robinet standard type machine à laver (20x27) (voir plan).

**VIDANGE:** Tuyau type machine à laver Ø 40 avec siphon, fixé et coupé à 10 cm sous l'appareil (voir plan).

**IMPORTANT:** le tuyau souple de vidange sortant de l'appareil ne doit pas toucher l'eau du siphon (le raccourcir si nécessaire) et doit rester libre à l'entrée du tube de vidange sans étanchéité.

**En aucun cas le tuyau de vidange ne doit remonter au dessus du fond du châssis de l'appareil (Page 26).**

**Volume d'eau consommé par bain en cycle Panier = 9 litres**

**Volume d'eau consommé par bain en cycle Casette = 20 litres**

### INSTALLATION :

Installer dans un meuble au sol de 60 cm de large au minimum.

Fixer sur plan de travail par joint en silicone étalé sous le pourtour inférieur du support en PEHD blanc.

L'appareil doit être installé dans une zone bien ventilée.

Ne jamais couvrir le capot pour éviter toute dégradation par manque de ventilation, obligatoire dans la cuve, surtout au moment du séchage.

Il est conseillé de placer à proximité de l'appareil un mitigeur douche afin de pouvoir nettoyer la cuve après usage.

### RACCORDEMENTS :

Brancher le tuyau flexible de raccordement d'eau au robinet.

Placer le tuyau de vidange comme indiqué précédemment.

Placer les bidons des produits détergents sous l'appareil et plonger les cannes d'aspiration dans les bidons en respectant les codes couleurs appropriés à chaque produit :

**Jaune pour PROCLEAN - Bleu pour DPH21 - Transparent pour DETERBAKT®**

Brancher la prise électrique.

Ouvrir le robinet d'eau et vérifier l'étanchéité des raccordements.

**Régler l'ouverture du robinet d'eau afin d'éviter tout phénomène de mousse lors du remplissage avec les produits.**

### MISE EN SERVICE :

Mise sous tension par l'interrupteur I/O - le voyant vert s'allume et la ventilation fonctionne en air froid. Cette ventilation permanente est normale, elle assure un air sec après le cycle de séchage dans le volume de la cuve.

**Fonctionnement en cycle automatique :** (bouton poussoir "PANIER" ou "CASSETTE")

- ▶ Vidange
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Nettoyage sous ultrasons avec le produit PROCLEAN (T=15 min)
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons
- ▶ Rinçage en eau claire sous ultrasons avec le produit DPH21
- ▶ Séchage par air chaud = 21 min (cycle "PANIER") / 32 min (cycle "CASSETTE")  
(Durée totale du cycle automatique "PANIER" ≈ 55 min)  
(Durée totale du cycle automatique "CASSETTE" ≈ 75 min)

**Fonctionnement en cycle manuel :** (boutons poussoirs)

- ▶ **"PREDESINFECTION PANIER / CASSETTE"**: commande le remplissage de la cuve en eau claire+ produit DETERBAKT® dosé à sa concentration normale d'emploi.
- ▶ **"REPLISSAGE EAU"** : commande le remplissage en eau claire de la cuve  
1<sup>ère</sup> impulsion = jusqu'au niveau "PANIER"  
2<sup>ème</sup> impulsion (une fois le niveau "PANIER" atteint) = jusqu'au niveau "CASSETTE"
- ▶ **"ULTRASONS"** : commande 7 min d'ultrasons
- ▶ **"VIDANGE"** : commande la vidange du bain
- ▶ **"SÉCHAGE"** : commande 14 min de séchage en air chaud.



**NB:** Le voyant "FIN DE CYCLE" allumé signale la disponibilité de l'appareil.

**EN FIN DE MISE EN SERVICE, LAISSER L'APPAREIL EN ÉTAT DE PROPRETÉ**  
(cuve rincée et essuyée - capot propre)

### ENTRETIEN :

Renouveler le filtre à air (Réf. MF30) situé à l'arrière du capot tous les 3 mois maximum et, plus fréquemment si utilisation intensive de l'appareil.

Document à caractère non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos appareils dans le souci de toujours mieux servir notre clientèle

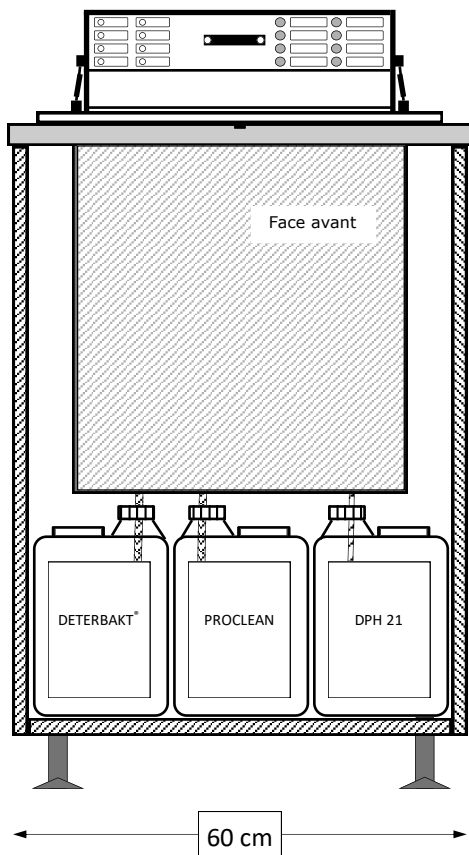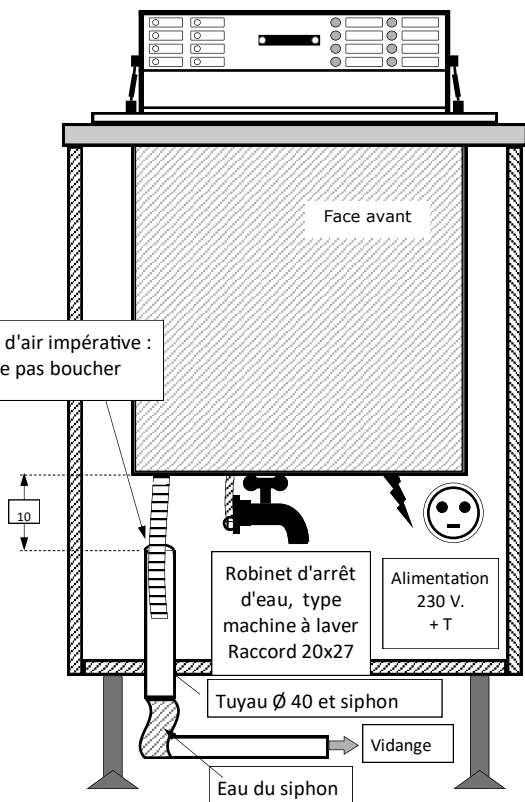

### Environnement:

- Utilisation exclusive de l'appareil à l'intérieur.
- Conserver l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Plage de la température d'utilisation : +2°C / +50°C
- Plage de la pression atmosphérique : 50kPa / 106kPa
- Altitude d'utilisation maximale = 2000 m
- Plage d'humidité : 30% / 90%
- Tension du réseau d'alimentation : 230V +/- 10V