

**L'EXCELLENCE du nettoyage
par ULTRASONS**



***Y*SONIC**

GAMASONIC - France

Kit DYNASEPT® KD6

**Support de nettoyage
des Porte-Instruments Dynamiques (P.I.D.)**

TURBINES - PIÈCES À MAINS - CONTRE-ANGLES - DÉTARTEURS



Capacité : 6 Porte-Instruments Dynamiques



Illustrations d'utilisation du kit DYNASEPT® KD6



Un kit DYNASEPT® KD6 complet comprend :

- 1 Support Tubes
- 6 Tubes verre avec Joints
- 2 Détergents DYNASEPT®
(2 bidons de 1 litre)



Le Kit DYNASEPT® KD6

- Conçu pour le nettoyage manuel des Portes-Instruments Dynamiques (P.I.D.) au cabinet dentaire.

- Le kit DYNASEPT® **KD6** comprend :

- ▶ 1 Support Tubes
- ▶ 6 Tubes en verre (éprouvettes) + Joints
- ▶ 2 Bidons de détergent DYNASEPT® 1 Litre (Dispositif Médical nettoyant de classe IIb)

- Plusieurs versions disponibles :

- ▶ **ST6** : Support Tubes (PEHD) pour cuves 3L. / 9L. / 12L. / 17L. / 30L.
- ▶ **ST6K7** : Support Tubes (PEHD) pour cuves 17L.K7 / 30L.K7

- Options possibles :

- ▶ Bac support en inox de 3,5 L : Réf. **BK6**
- ▶ Appareil de nettoyage par ultrasons : **SONOCLEANER** ou **SNC Digital**

Liste des pièces détachées :

ST6 : Support Tubes
ST6K7 : Support Tubes
TJ2 : Tubes par lot de 2
JTTB : Joint seul
BK6 : Bac support inox
SMK6 : Kit équerres (support)

MODE D'EMPLOI :

1. Tenir l'éprouvette horizontalement et insérer délicatement l'instrument souillé tête en bas.

Immerger totalement l'instrument* avec le détergent DYNASEPT® pur.

Ne pas laisser tomber l'instrument dans le tube.

** Suivre les recommandations du fabricant du P.I.D.*

2. Placer l'éprouvette en verre sur le support ST6. Positionner le joint sur l'éprouvette de manière à ce que le tube en verre soit en contact avec le bain dans la cuve à ultrasons.

3. Lancer un cycle d'ultrasons.

Possibilité d'utiliser un appareil SONOCLEANER ou SNC Digital de GAMASONIC.

Traitement jusqu'à 6 instruments par support ST6.

4. Récupérer l'instrument tout en vidangeant le bain souillé de l'éprouvette en verre dans l'évier.

5 Rincer l'instrument au robinet (eau potable).


6. Égoutter au maximum l'instrument et le sécher à l'aide :

- Air comprimé (Air médical) + passage au sécheur de la gamme CYCLONIC de GAMASONIC.
- ou
- Laveur-Désinfecteur de la gamme SNC Digital de GAMASONIC (cycle séchage)

7. Poursuivre le traitement de l'instrument jusqu'à l'étape de stérilisation.



P.I.D. immergés prêts à passer aux Ultrasons

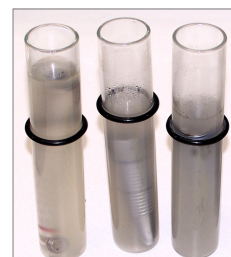

P.I.D. nettoyés avant rinçage

La durée de validité du détergent dans le tube en verre est de 1 cycle. Bain à usage unique.

COMPATIBILITE PRODUIT DETERGENT GAMASONIC :

Les performances du Kit DYNASEPT® **KD6** sont exclusivement atteintes avec l'utilisation du produit détergent DYNASEPT® de GAMASONIC.



DYNASEPT® 1L
Réf. DYN1L

DYNASEPT® 5L
Réf. DYN5L

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le kit DYNASEPT® est destiné à l'asepsie manuelle des porte-instruments dynamiques immergeables, pour un usage professionnel (Professionnel de santé).

Ne pas traiter d'instrumentation non compatible avec l'immersion et/ou la technologie ultrasonore (voir les recommandations des fabricants d'instruments).

Le kit DYNASEPT® ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ne pas laisser l'instrument immergé au-delà du temps de nettoyage préconisé.

Nettoyer et sécher les tubes en verre entre chaque utilisation.

Ne jamais disposer l'instrumentation médico-chirurgicale sans support (tubes en verre, bécquer...) dans la cuve

Ne jamais lancer un cycle ULTRASON sans eau.