


L'EXCELLENCE du nettoyage Par ULTRASONS



Laveur Automatique par Ultrasons SNC Slide 17

Performance - Efficacité - Sécurité

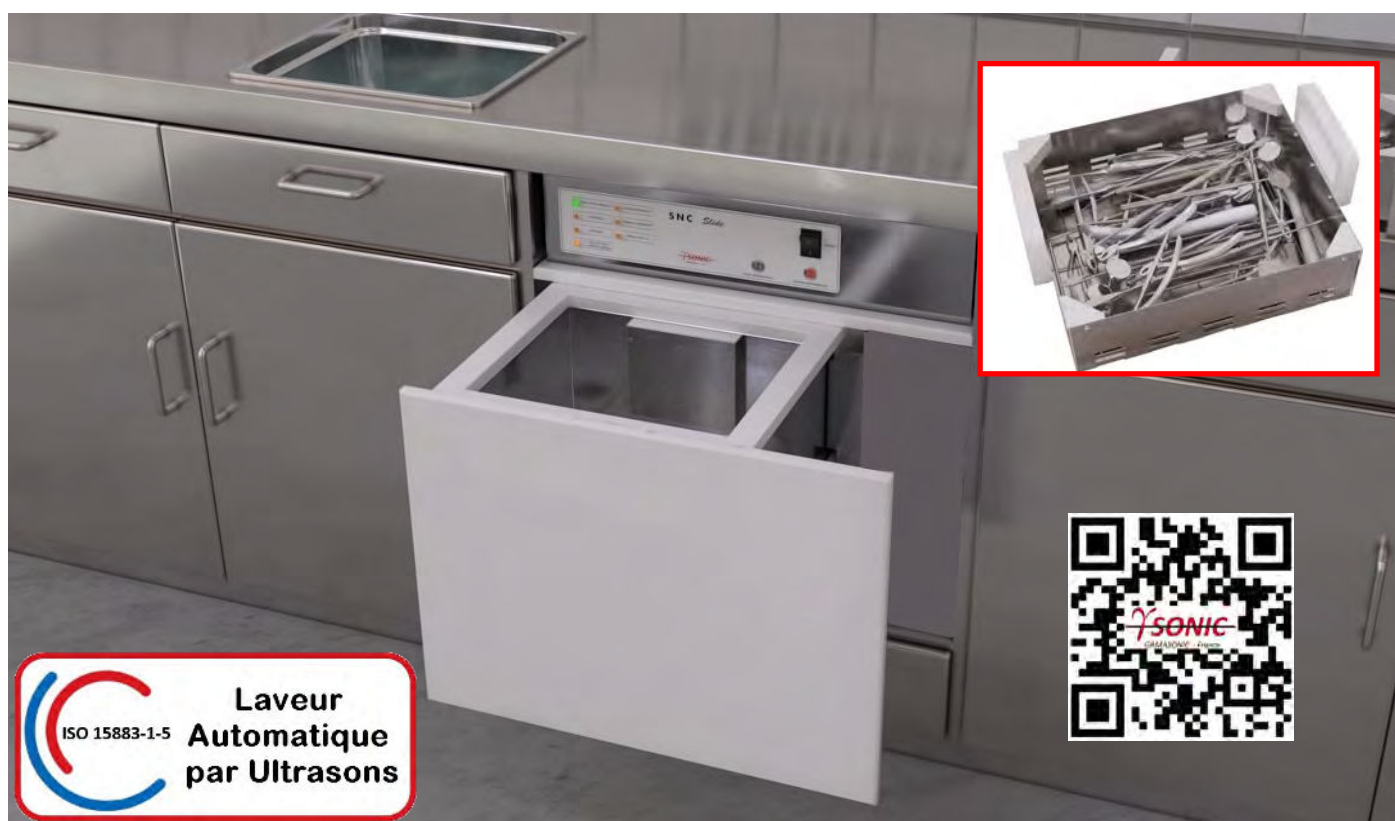

Version sous plan de travail

Le Laveur automatique SNC *Slide 17* bénéficie de
la technologie Ultrasonore GAMASONIC pour
Nettoyer - Désinfecter - Rincer - Sécher
l'instrumentation réutilisable au cabinet dentaire

Le Laveur Automatique SNC Slide 17 (ISO 15883-1-5)



Instrumentation classique
1 x Panier P3




Instrumentation classique
1 x Panier P12
Capacité ≈ 20 patients



Ouverture / Fermeture
du tiroir automatisée

- Conçu pour aseptiser l'instrumentation médico-chirurgicale réutilisable au cabinet dentaire
- Installation sous plan de travail (largeur module de meuble = 60 cm)
- Dispositif Médical CE validé ISO 15883-1-5.
- Ouverture pneumatique du tiroir (raccordement d'air comprimé nécessaire)
- Paniers d'instrumentation classique pour répondre à vos applications :

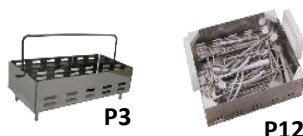

Cycle OUVERTURE / FERMETURE du tiroir

- Automatisée via une impulsion sur bouton poussoir :
« Ouverture/Fermeture »

PRÉ-DÉSINFECTION

Cette phase doit impérativement être effectuée en amont de l'appareil.

En aucun cas, cette étape ne peut-être effectuée à l'intérieur de l'appareil SNC Slide 17.

Cycle AUTOMATIQUE :

- Rinçage en eau claire sous ultrasons
- Nettoyage sous ultrasons avec détergent « Nettoyant »
- Rinçage en eau claire sous ultrasons
- Rinçage en eau claire sous ultrasons avec détergent « Rinçant »
- Séchage par air chaud

Cycle ≈ 55 minutes

COMPATIBILITE PRODUITS DETERGENTS GAMASONIC :

Les performances de l'appareil SNC Slide 17 sont atteintes exclusivement avec l'utilisation des produits GAMASONIC :

- DETERBAKT® (Nettoyant-Désinfectant)
- DPH21 (Produit Rinçant) de GAMASONIC.



DETERBAKT® DPH21

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

L'appareil SNC Slide 17 est un dispositif médical destiné à l'asepsie de l'instrumentation médico-chirurgicale à usage professionnel (Professionnel de santé).

L'appareil SNC Slide 17 ne se substitue pas à une stérilisation des instruments après leur nettoyage.

Ne jamais disposer l'instrumentation médico-chirurgicale sans panier dans la cuve

Remplir la cuve en eau potable (dureté de l'eau comprise entre 8 et 12°TH)

Lire la documentation technique de l'appareil avant toute utilisation.